

Hormontests

hCG Teststreifen

für den qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons Humanes Choriongonadotropin (hCG) in Urinproben.

Produkt-ID: M06D01



Bei diesem Test wird ein gabControl® hCG Teststreifen mit der Spitze in einen mit Urin gefüllten Probenbehälter gehalten.

Der gabControl® hCG Teststreifen weist qualitativ humanes Choriongonadotropin (hCG) in Urinproben nach. Die Nachweisgrenze liegt bei 25 mIU/ml.

Bereits in der frühesten Schwangerschaftsphase produziert der weibliche Körper das hCG-Hormon, das schon 10-14 Tage nach einer möglichen Empfängnis nachgewiesen werden kann. Das

Auftreten von hCG in Urin bereits kurz nach der Empfängnis und sein nachfolgender schneller Konzentrationsanstieg während der frühen Gestationsphase machen es zu einem hervorragenden Test für den frühzeitigen Schwangerschaftsnachweis.

Das Testkit enthält alles, was Sie für die sichere und saubere Testdurchführung benötigen:

- gabControl® hCG Teststreifen in der Entnahmedose
- Packungsbeilage

Bitte beachten: Die Entnahmedose nach der Entnahme der benötigten Anzahl von Teststreifen sofort wieder fest verschließen. Das Datum des ersten Öffnens auf der Entnahmedose vermerken. Nach dem ersten Öffnen der Entnahmedose sind die verbleibenden Teststreifen nur noch 90 Tage haltbar.

hCG Teststreifen

Produkt-ID: M06D01


Testdurchführung




1. Sammeln Sie die Urinprobe in einem sauberen und trockenen Behälter.
2. Teststreifen und Urinproben und/oder Kontrollen vor Testbeginn Raumtemperatur (15-30° C) erreichen lassen.
3. Die Entnahmedose vor dem Öffnen Raumtemperatur erreichen lassen. Entnehmen Sie den Teststreifen aus der Entnahmedose und verwenden Sie diesen sobald wie möglich.

4.  Den Teststreifen in Pfeilrichtung senkrecht für höchstens 10-15 Sekunden in die Urinprobe eintauchen. Nicht über die auf dem Teststreifen angezeigte Markierung (MAX) eintauchen.

5. Teststreifen auf eine nicht absorbierende, ebene Unterlage legen. Stoppuhr starten. Warten Sie bis zum Erscheinen der farbigen Linie(n). Das Ergebnis nach 3 Minuten ablesen.

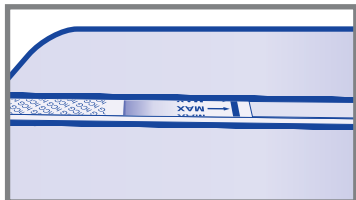

HINWEIS: Bei einer niedrigen hCG-Konzentration kann im Testbereich (T) nach einer längeren Zeitspanne eine schwache Linie sichtbar werden. Das Ergebnis deshalb nach mehr als 10 Minuten nicht mehr auswerten.

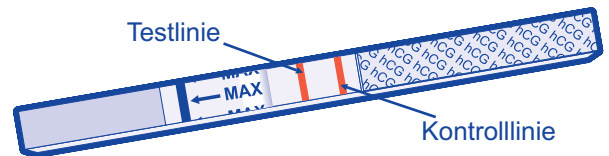


6. Interpretation der Ergebnisse:

Positiv - schwanger: Es erscheinen zwei Linien eine im Kontrollbereich (C) und eine Linie im Testbereich (T).



Negativ - nicht schwanger: Es erscheint nur eine Linie im Kontrollbereich (C). Im Testbereich (T) erscheint keine Linie.

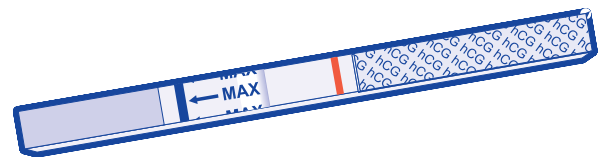

Ungültig: Die Kontrolllinie (C) erscheint nicht. Überprüfen Sie den Verfahrensablauf und wiederholen Sie den Test mit einem neuem Teststreifen.

Hersteller:

gabmed GmbH
Praxis- und Drogendiagnostika
Am Wassermann 28, 50829 Köln / Deutschland
Tel.: +49 (0) 2 21 - 56 97 3 - 0, Fax: +49 (0) 2 21 - 56 97 3 - 250
www.gabmed.de, E-Mail: info@gabmed.de