

QUICKVUE® Influenza A+B TEST

QuickVue® Influenza A+B • 25 Test Kit • Katalog #20183 / QuickVue® Influenza A+B • 2 Test Kit • Katalog #20185 
QuickVue® Transportröhrchen-Set mit Nasentupfern • Katalog #20171 

Diagnose und Behandlung in einem Tag

Die Diagnose von Influenza kann schwierig sein. Ein Drittel aller Infektionen im oberen Respirationstrakt werden durch Influenza-Viren verursacht.¹ Diese führten in Deutschland in der Saison 2004/2005 zu geschätzten 20.000 bis 30.000 Krankenhausbehandlungen und 15.000 bis 20.000 Todesfällen.² Immunschwache Patienten und Patienten mit chronischen Gesundheitsproblemen wie kongestive Herzinsuffizienz, Asthma und Diabetes tragen ein größeres Risiko schwere Komplikationen in Folge der Influenza-Infektionen zu erleiden.¹

Die höchste Ansteckungsrate findet man jedoch bei Schulkindern, die entscheidend zur Ausbreitung der Influenza in der Bevölkerung beitragen.²

Der QuickVue® Influenza A+B Test von Quidel ermöglicht eine Schnellbestimmung von Influenza Typ A und Typ B innerhalb von 10 Minuten. Die schnelle und Typ-spezifische Diagnose ermöglicht die Wahl der antiviralen Therapie, hilft den übermäßigen Gebrauch von Antibiotika zu vermeiden, und verhindert Gesundheitskosten durch unnötige Tests und Behandlungen.³



- 1 - <http://www.cdc.gov/flu>
- 2 - A.Janauskas et al. Wie können die 20.000 Influenza Todesfälle in Deutschland verhindert werden. Poster – 1007; 112. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden – Germany 2006
- 3 - Montalto, N.J.D.O. An Office-based approach to Influenza: Clinical Diagnosis and Laboratory testing. Am.Fam.Phys.2003, 67 (1): 111-118

Schnelle Diagnose und Behandlung

- Erkennt innerhalb von 10 Minuten Influenza Typ A oder Typ B in positiven Proben.
- Patienten können meist an einem Tag diagnostiziert und behandelt werden.

Zuverlässiger Nachweis

- QuickVue® Influenza A+B detektiert sowohl Influenza Typ A- als auch Influenza Typ B- Antigene.
- Genaue Bestimmung mit Proben vom Nasentupfer.
- 94%-ige Sensitivität und 90%-ige Spezifität für Influenza Typ A.
- 70%-ige Sensitivität und 97%-ige Spezifität für Influenza Typ B.
- Beachten Sie weitere Informationen zu den Testeigenschaften auf der Rückseite.

Einfache Durchführung

- 3 Testschritte, 1 Reagenz, 90 Sekunden für Testansatz.
- 1 Testverfahren zur Erkennung von Influenza Typ A und Influenza Typ B.

Vorteile des QuickVue® Influenza A+B Tests

- Komplettes Testbesteck in jeder Packung enthalten, inklusive Nasentupfer, positive und negative Kontrollen.
- Packungsgrößen von 2 und 25 Tests.
- Lagerung bei Raumtemperatur und Haltbarkeit von 24 Monaten ab Produktion.
- Set mit Transporttupfern separat verfügbar.

QUIDEL
CORPORATION


Für weitere Informationen zum QuickVue® Influenza A+B Test, besuchen Sie bitte unsere Webseite, rufen Sie uns unter 001 858 552 1100 an oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.

Quidel Corporation • Weltweite Firmenzentrale • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • www.quidel.com




Probenahme mit Nasenabstrich

Zur richtigen Durchführung des Tests sollten die Tupfer aus der Testpackung verwendet werden. Es ist wichtig so viel Sekret wie möglich zu entnehmen. Bei der Durchführung eines Nasenabstrichs wird daher der sterile Tupfer in das Nasenloch, das bei visueller Untersuchung mehr Sekret produziert, eingeführt. Den Tupfer unter leichten Drehbewegungen bis zur Nasenmuschel vorschieben; diese befindet sich ca. 2 cm von der Nasenöffnung entfernt. Den Tupfer einige Male gegen die Nasenwand hin- und herdrehen.

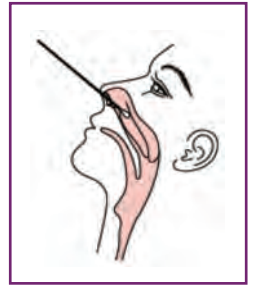

Verfahren bei Verwendung von Nasen-/Nasenrachentupfer:

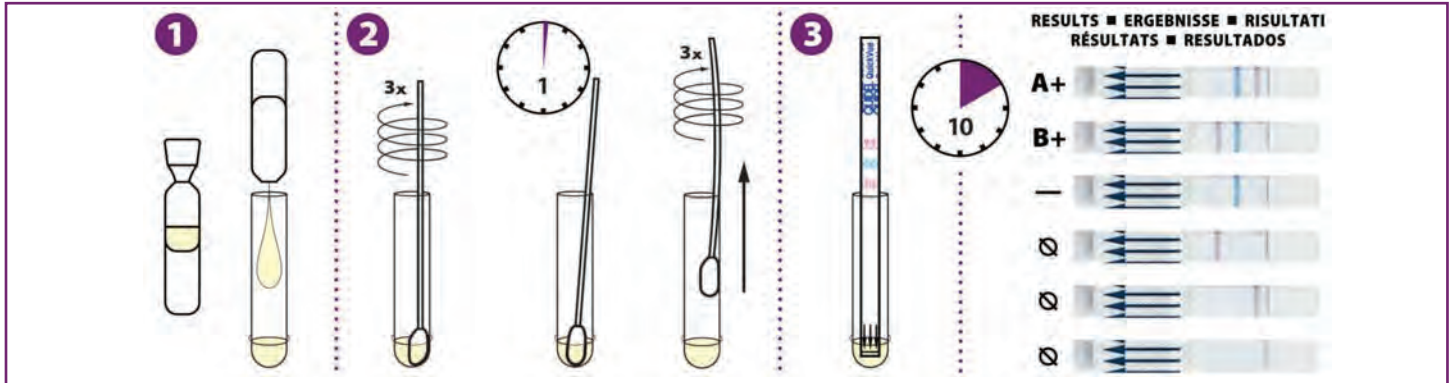

Nasentupfer:

Sensitivität: A – 94%, B – 70%

Spezifität: A – 90%, B – 97%

Genauigkeit: A – 91%, B – 93%

PV (+): A – 62%, B – 82%

PV (–): A – 99%, B – 94%

Nasenrachentupfer:


Sensitivität: A – 83%, B – 62%

Spezifität: A – 89%, B – 98%

Genauigkeit: A – 88%, B – 94%

PV (+): A – 67%, B – 80%

PV (–): A – 95%, B – 95%

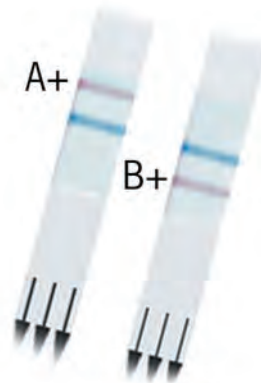

Die erzielten Testeigenschaften eines jeden Influenza Schnelltests sind abhängig von der Probenahme, der Probenbehandlung und der Befolgung der Packungsbeilage. Besuchen Sie unsere Webseite unter www.quidel.com für weitere Informationen zum QuickVue Influenza A+B Test.



Für Bestellungen: Rufen Sie Ihren lokalen Vertriebspartner an.

QuickVue Influenza A+B – 25 Test Kit Katalog # 20183

QuickVue Influenza A+B – 2 Test Kit Katalog # 20185

QuickVue Swab Transport Tube Set Katalog # 20171



QUIDEL[®]

Für weitere Informationen zum QuickVue Influenza A+B Test, besuchen Sie bitte unsere Webseite, rufen Sie uns unter 001.858.552.110 an oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.

C O R P O R A T I O N • Weltweite Firmenzentrale • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • www.quidel.com oder www.flutest.com

Ihr Ansprechpartner: